



ANEXO
FICHA TÉCNICA SOLUCIÓN DE AMONIO
CUATERNARIO DE QUINTA GENERACIÓN
(ActiveZone)

Código: DT-ANX-012-PR-004
Página: 1 de 3
Versión: 1

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO



Nombre: Solución desinfectante con Amonio cuaternario de quinta generación de acción 24 horas (ActiveZone)

Marca: ActiveZone® **Fabricante:** CENTURY MEDICARE **Código:** Según Presentación **Vida Útil:** 2 años

Registro Sanitario: INVIMA 2024DM-0029865 **Fecha de vencimiento:** 2034-Nov-27 **Riesgo:** IIa

Uso previsto:

Desinfectante bactericida, fungicida, viricida y esporicida. Elimina esporas como Clostridium difficile. Es un producto de acción rápida para limpiar y desinfectar en solo paso dispositivos médicos, equipos biomédicos y mobiliario en el ámbito hospitalario e institucional.

Presentación Comercial:

Envase por 750mL con válvula spray, 1 Galón y Bidón por 20L.

Descripción del Producto:

ActiveZone® es un limpiador desinfectante dual con acción antimicrobiana con efecto residual contra virus, bacterias, hongos y algunas esporas. Su rápida acción se da desde los 30 segundos y elimina en 5 minutos más del 99,9% de las bacterias y virus (1), incluidos los virus del resfriado, la influenza y el COVID-19 (SARS-CoV-2). El producto sigue siendo eficaz gracias a su efecto residual, mientras no se limpie/enjuague después de la aplicación, incluso cuando los dispositivos se contaminan repetidamente por contacto. ActiveZone® es una fórmula líquida lista para usar y se puede usar para limpiar y desinfectar equipos, dispositivos, mobiliario, entorno de paciente, garantizando una limpieza y desinfección sin residuos. Compatible con policarbonato, vidrio, acero, plástico, pintura y otros materiales sólidos no porosos. Producto para aplicar en paño y luego realizar los barridos de limpieza y desinfección, no destinado a aplicación en humanos o animales.

(1) Normas de ensayo: bactericida, EN 1276 / EN 13697; viricida, EN 14476 / EN 16777.

(2) Estándar de prueba: Reino Unido BSI PAS 2424.

Condiciones de Almacenamiento

La vida útil de este producto es garantizada siempre y cuando el empaque esté intacto y se mantengan las siguientes condiciones de almacenamiento:

- Temperatura ambiente, almacenar en lugar fresco y seco, no exponer a la intemperie.

Vida útil: 2 años en su envase original, 11 meses después de abierto.

Indicaciones de Uso:

Elaborado: Mónica Cipagauta
Coordinadora de Aseguramiento y Control de Calidad

Revisado: Hernán Herrera
Director Técnico

Aprobado: Hernán Herrera
Director Técnico

Fecha: 2025-May-20

Fecha: 2025-May-21

Próxima revisión: 2028-May-21



ANEXO
FICHA TÉCNICA SOLUCIÓN DE AMONIO
CUATERNARIO DE QUINTA GENERACIÓN
(ActiveZone)

Código: DT-ANX-012-PR-004

Página: 2 de 3

Versión: 1

1. Impregne ActiveZone® sobre un paño, compresa o el elemento destinado para el proceso.
2. Después de impregnar el paño realizar el barrido de limpieza y luego una segunda aplicación para barrido de desinfección.
3. Dejar actuar y esperar a que se seque.
4. No es necesario retirar.

Precauciones:

1. Lea detenidamente la etiqueta y siga todas las instrucciones.
2. En caso de requerir atención médica, tenga a la mano el envase o la etiqueta del producto.
3. Mantenga fuera del alcance de los niños.
4. Utilizar EPP de protocolo para su uso
5. Lave bien la piel después de la manipulación.
6. En caso de contacto con la piel: Lave con abundante agua y jabón.
7. En caso de contacto con los ojos: Enjuague cuidadosamente con agua durante varios minutos. Retire los lentes de contacto si es fácil hacerlo. Continúe enjuagando. Solicite atención médica si es necesario.
8. Evite liberar el producto al medio ambiente. En caso de derrames, recójalos adecuadamente.
9. Proteja el producto del frío extremo, las heladas y el calor.
10. Deseche el contenido y el recipiente de acuerdo con la normativa local.

COMPOSICION

Ingrediente activo: Amonio cuaternario de quinta generación, Polyhexamethylene Guanidine.

Otros ingredientes: Solución Amortiguadora, Agua.

EMPAQUE

COMPONENTE	MATERIAL
Envase PEAD	Polietileno de Alta densidad
Etiqueta impresa	Papel adhesivo
Válvula Aspersora	Plástico
Embalaje en caja corrugada	

CONTROLES DE CALIDAD

ORGANOLÉPTICOS	• Aspecto físico: líquido transparente • Integridad del envase • Inspección y control de etiquetado
FISICOQUÍMICOS	• pH: 3.5-4.5 • Densidad de la solución: 0.98-1.05

PROPIEDADES

Estado a temperatura ambiente	Líquido
Inflamable	No (punto de ebullición 200°F)
pH	3.5 - 5.5
Densidad	0.96-1.1

Elaborado: Mónica Cipagauta
Coordinadora de Aseguramiento y Control de Calidad

Revisado: Hernán Herrera
Director Técnico

Aprobado: Hernán Herrera
Director Técnico

Fecha: 2025-May-20

Fecha: 2025-May-21

Próxima revisión: 2028-May-21

	ANEXO	Código: DT-ANX-012-PR-004
	FICHA TÉCNICA SOLUCIÓN DE AMONIO CUATERNARIO DE QUINTA GENERACIÓN (ActiveZone)	Página: 3 de 3
		Versión: 1

Interacción con materiales	No raya, no mancha, no corroe, no oxida.
Estabilidad de ActiveZone	Mantiene su potencia y efecto desinfectante hasta 11 meses después de abierto.
Interacción frente a residuos orgánicos, aguas duras y suciedad	No se inactiva en presencia de estos, excelente efectividad.
Efectividad en medios ácidos y alcalinos	Efectivo
Efecto residual	Propio de los amonios.
Color	Incoloro transparente
Olor / Fragancia	Sin Olor
Biodegradable	Sí, Cumple normatividad ANLA
Eliminación de residuos	Normal, no requiere eliminador de residuos especializado.

ESTÁNDARES DE CALIDAD DE REFERENCIA		
BPM: Buenas prácticas de manufactura.		
INFORMACIÓN COMERCIAL		
Referencia	Descripción de la Referencia	Embalaje
BKAC575	ActiveZone® envase x 750mL spray	Caja x 12 unidades
BKAC5G	ActiveZone® Galón x 3.8 L	Caja x 4 unidades
BKAC20L	ActiveZone® Bidón X 20 L	Unidad

Distribuidores:

Colombia:

Century Medicare S.A.S. Carrera 13 # 63-39 Oficina 904, Tel: 4327887, Cel: 3176687701
servicliente@centurymc.com.co - www.centurymc.com, Bogotá D.C. - Colombia

Elaborado: Mónica Cipagauta Coordinadora de Aseguramiento y Control de Calidad	Revisado: Hernán Herrera Director Técnico	Aprobado: Hernán Herrera Director Técnico
Fecha: 2025-May-20	Fecha: 2025-May-21	Próxima revisión: 2028-May-21